

ČISTIACE RÚŠKA
PRIPRAVENÉ K
OKAMŽITÉMU POUŽITIU
NA JEMNÉ ČISTENIE A
DEBRIDEMENT RÁN A
ICH OKOLIA



JEMNÉ A ŠETRITÉ
ČISTENIE RÁN

CLEANWND®

ČISTIACE RÚŠKA NA DEBRIDEMENT RÁN



Kyselina hyalurónová
Fosfolipidy
Aloe Vera

ČO JE CLEANWND®?

CLEANWND® je impregnovaná netkaná textília, ktorá sa používa ako inovatívny systém debridementu a terapie rán. Dôkladne a prakticky bezbolestne odstraňuje nečistoty a exsudát z rany a odstraňuje šupinky a keratózu z okolitej kože.

CLEANWND® sa vyrába metódou „vpichovania“, čím sa tvoria krátke vlákna, ktoré ľahko zachytávajú nečistoty v rane počas mechanického debridementu. Je výhodou, že pri čistení nezostávajú zvyšky vlákien v lôžku rany alebo na okolitej koži.

INDIKÁCIE

Chronické a akútne rany

Diabetické vrede

Venózne vrede

Dekubity

Traumatické rany

AKÉ SÚ VÝHODY?

- Čistiace rúška CLEANWND® sú už impregnované, takže nie sú potrebné žiadne látky navyše na čistenie rany.
- Jednoduché používanie.
- Odstraňuje odumreté tkanivo a keratózu z rany a okolitej kože.
- Obsahuje upokojujúce Aloe Vera.
- Šetrí čas a náklady na ošetrovanie.
- Vysoká miera tolerancie pacientmi, takmer bezbolestné použitie.

VRED PREDKOLENIA



CLEANWND®

ČISTIACE RÚŠKA NA DEBRIDEMENT RÁN



Pred použitím

Po použití



Pred použitím

Po použití



AKO TO FUNGUJE?

Rúška CLEANWND® sú vopred napustené kyselinou hyalurónovou, fosfolipidmi a Aloe Vera. Kyselina hyalurónová je dôležitou súčasťou extracelulárnej matice pokožky a zohráva mimoriadnu úlohu pri procesoch metabolizmu pokožky, pri hojení rán a obnove tkanív. Fosfolipidy podporujú čistenie pokožky a vo veľkej miere nahradia tukové častičky, ktoré sa zničili pri poškodení tkaniva samotnej rany a jej okolia. Aloe vera má antivírusové a protizápalové vlastnosti, ktoré urýchľujú hojenie a znižujú bolesť, upokojuje podráždenie.

NÁVOD NA POUŽITIE

Otvorte obal na naznačenom mieste, vyberte a rozložte rúško. Ranu poutierajte textíliou, čím sa odstránia odumreté častičky. Rúško je možné použiť z oboch strán. Na vyčistenie rany je postačujúce použitie jediného rúška CLEANWND®. Čistiace rúška CLEANWND® sú už vopred napustené, takže na vyčistenie rany nie sú potrebné žiadne dodatočné látky. Po použití čistiace rúško zlikvidujte spôsobom určeným pre klinický odpad.

Kód ŠUKL : A3795A

Rúško na čistenie chronických rán
CleanWND® 15 x 20 cm, bal 10 ks

plná úhrada zdravotných poisťovní

- EN ISO13485
Quality Management Systems
- EN ISO 9001
Quality Management Systems
- EN ISO 8 CLEAN ROOM
- 93/42/EEC
Medical Device Class IIa
- CE 0653

Spotrebiteľské balenie

1 krabica po 10 rúšok

Rozmer

15cm x 20 cm

Balenie

1 rúško / vrecúško

Doba použiteľnosti

3 roky



NETKANÁ VYPICHOVANÁ TEXTÍLIA



LagoMedical Slovakia, spol. s r.o.
Košická 52/A, 821 08 Bratislava
www.lagomedical.sk
info@lagomedical.sk